

RWD

R640-S1

Ветеринарная
анестезиологическая установка

Надежное качество & Экономичность




CONTENTS

01 Презентация продукта

02 Конфигурация & Спецификация


03 Анализ конкурентных продуктов

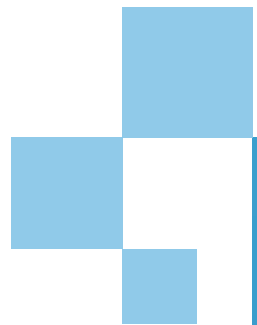

Презентация продукта

R640-S1 структура

RWD

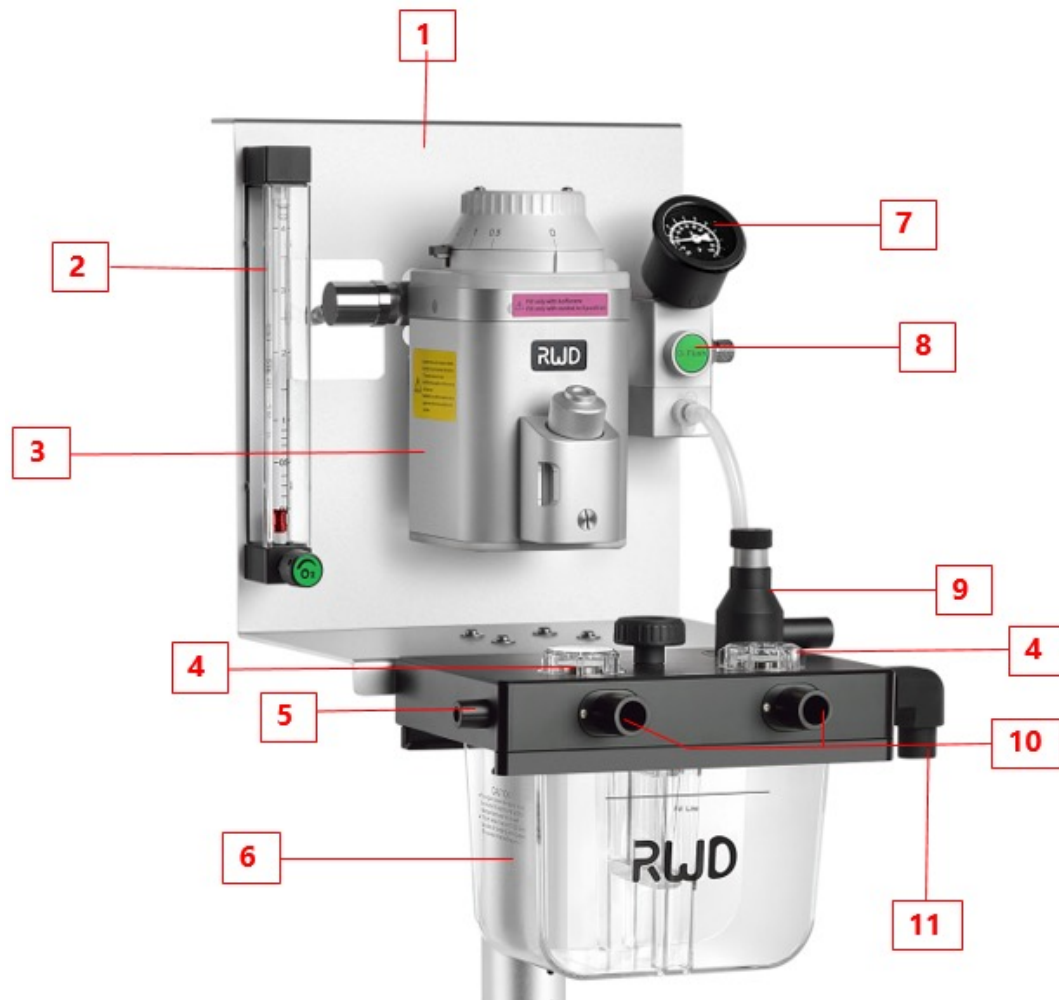

Наименование	Функции
1 Основная поддержка	Поддержка компонентов.
2 O2 расходомер	Контроль расхода кислорода
3 Испаритель	Преобразует жидкий анестетик в газ.
4 Клапан вдоха и выдоха	Модуль управления направлением потока газа
5 Заглушка дыхательного контура.	Используется для обнаружения утечек в системе, регулировки давления в системе и промывки контура.
6 Канистра абсорбера CO2	Для поглощения CO2, выдыхаемого животным в дыхательном цикле, во время анестезии
7 Манометр	Измеряет и отображает давление газовой смеси в дыхательном контуре.
8 Кнопка смыва O02	Открытие быстрого большого потока кислорода
9 APL-клапан	Сброс давления и функция выключения ключа
10 Порт возвратного дыхательного контура.	Используется для подключения к обратному дыхательному контуру.
11 Крепление для дыхательного мешка	Используется для подсоединения к дыхательному мешку



R640-S1 Ветеринарная анестезиологическая установка

Подходит для клинической анестезии собак, кошек, свиней, обезьян, грызунов, рептилий и других животных. Это действительно экономично и современно.

01

Тренд

02

Экономичность



Два цвета



Монтаж для установки полки монитора



Поддержка повторного дыхания и без повторного дыхания

01

Включено



Контур повторного дыхания :

Подходит для животных весом от 7 кг до 100 кг

02

Опция




Контур без вентиляции :

Подходит для животных весом до 7 кг

Соответствует потребностям животных с разной массой тела (менее 100 кг)



Кнопка промывки кислорода

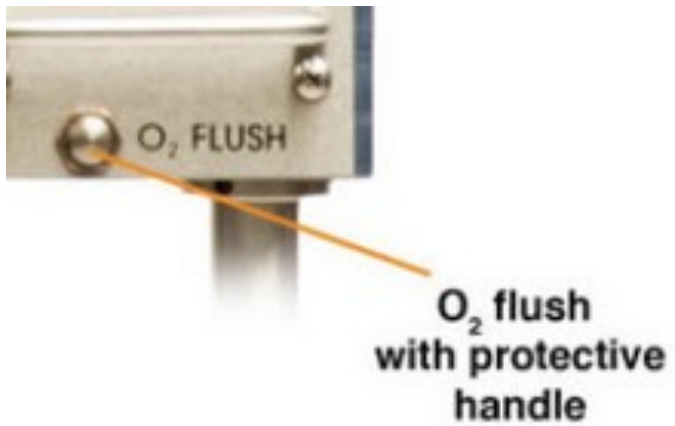

Все бренды



R640-S1

Утопленная кнопка продувки кислородом — В случае непреднамеренного нажатия




Что делает R640-S1 великим?

RWD


- Доступны красный / серебристый цвета – удовлетворяет ваши предпочтения.
- Поддержка повторного дыхания и без повторного дыхания (опция) ,
Подходит для животных весом до 100 кг.
- Подставка для крепления в клетке и Selectatec для удовлетворения
потребностей разных клиентов.
- Опционально полка для монитора и держатель для канистр с абсорбентом
предоставляют большую свободу в работе
- Утопленная кнопка продувки кислородом - непреднамеренное нажатие
никогда не произойдет
- Видимый красный поворотный поплавок
- Конструкция запорной планки для дыхательного контура , Удобна для
проверки герметичности.
- 5 Маховик с фиксатором - более стабильный.




Как это работает — Контур повторного дыхания

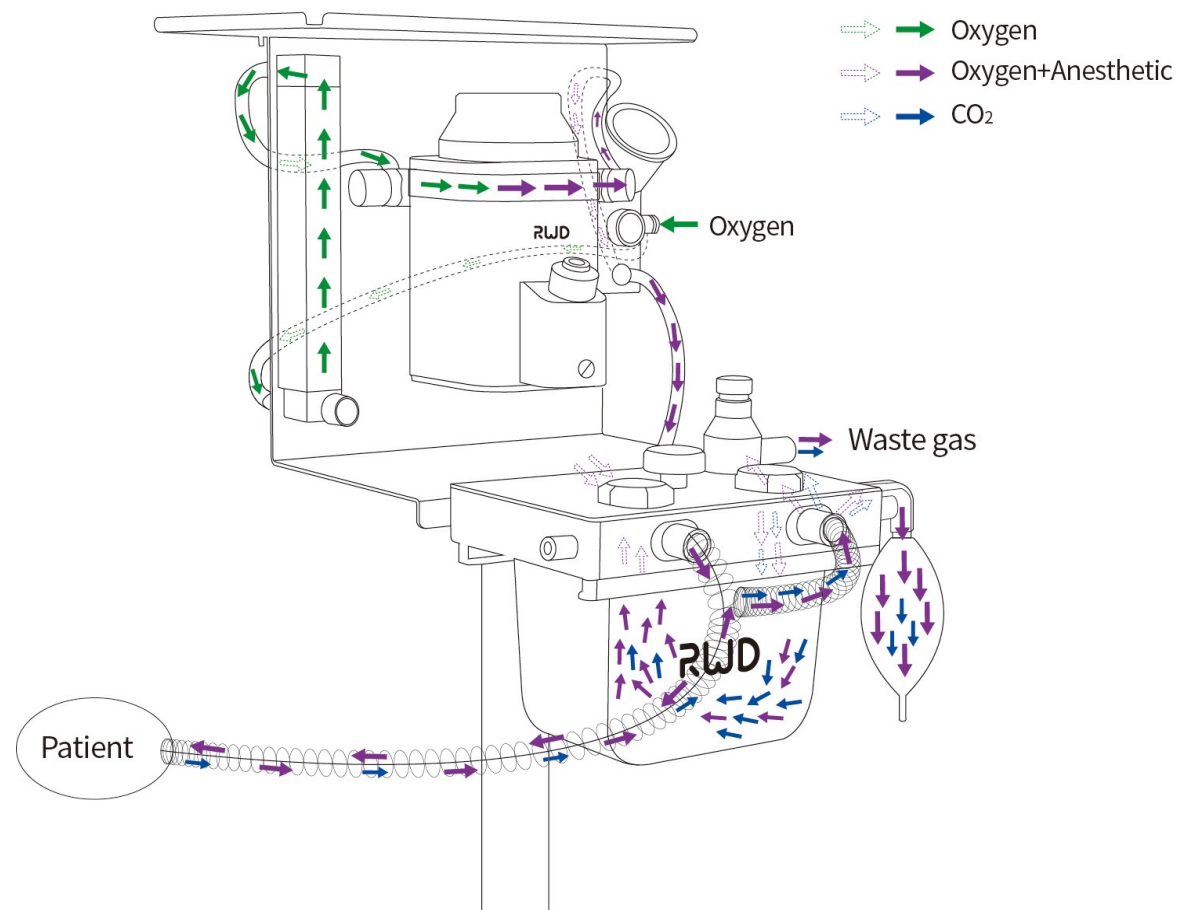

Как это работает — Контур без повторного дыхания

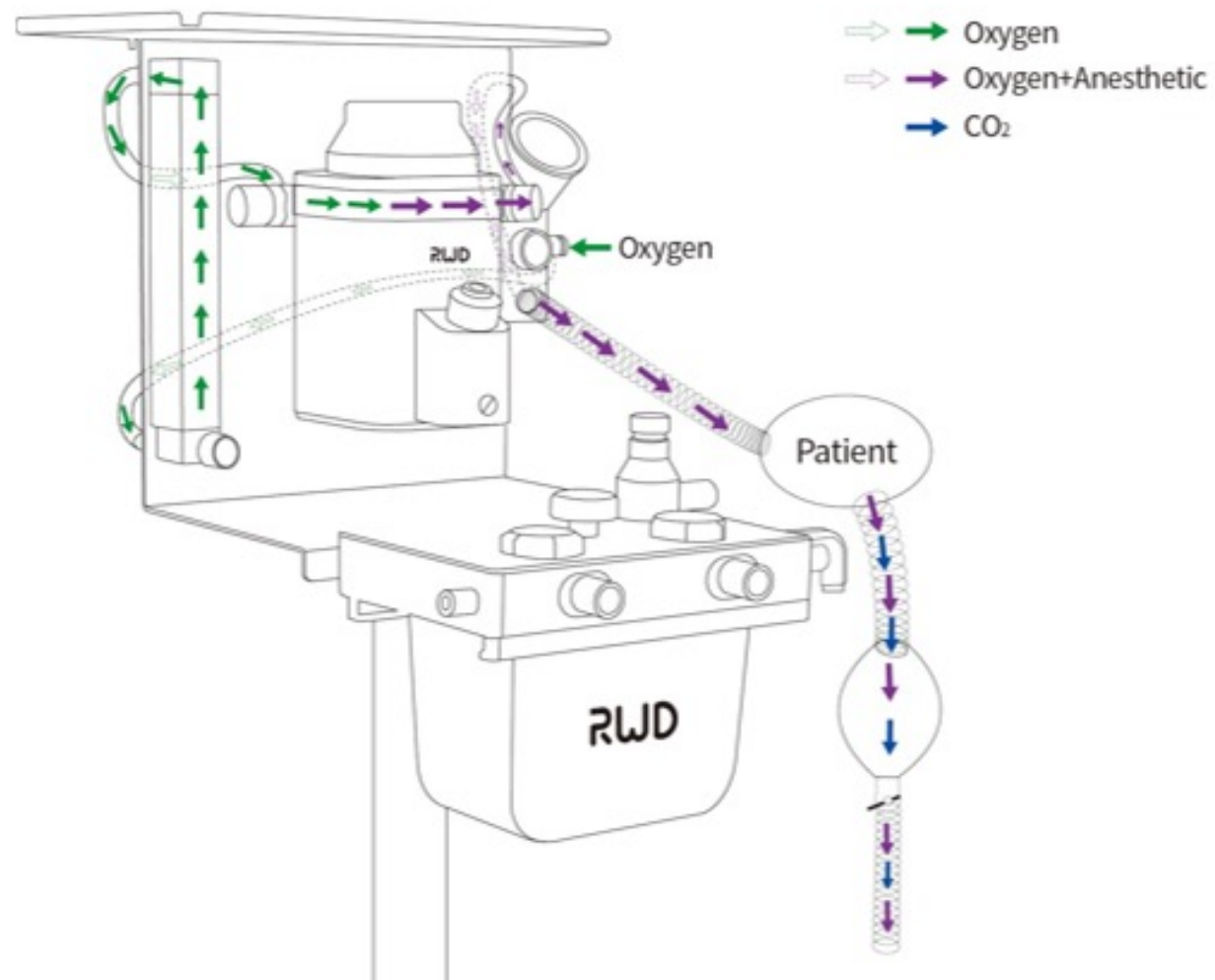

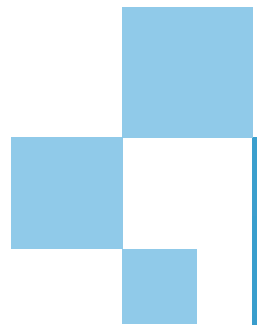

Конфигурация & Спецификация

Элементы	Спецификация
Монтажный узел серии R640-S1 с расходомером O2 (0,1-4 л / мин)	Узел подключения × 1, узел подвижного кронштейна × 1, узел главной цепи × 1
R580S испаритель	испаритель-изофлуран / наливной наполнитель / Крепление для клетки
Контур повторного дыхания	Лимбический дыхательный контур с низким сопротивлением воздуха , 1,5 м
Заглушки испарителя	Пара
Кислородная трубка	Соединение ID8.0-9 / 16, соединение M16 * 1.5, 2 м
Дыхательный мешок	1L

	Артикул	Продукт	Спецификация
Наркозный аппарат	R-NBC-F(JR)	Контур без повторного дыхания	Контур без повторного дыхания Mapleson F-типа
	R640-S1-MS-R	Полка для крепления монитора красная	330×230mm
	R640-S1-MS-S	Полка для крепления монитора серебрянная	330×230mm
	R-PG-O2-1M(CN)Pro	Регулятор	Выходное давление 0,35-0,45 МПа
	R-CH	Держатель для канистры	Кронштейн фильтра × 1, стопорное кольцо × 1, винт × 2
	R548	Измеритель веса	Коэффициент разрешения 1 г
	R548-MB	Держатель для измерителя веса	265×150mm
		Мобильный кронштейн в сборе (с 4-футовым основанием)	Колонна в сборе (с 4-футовым основанием) × 1 , Компоненты основания × 1 , Фиксатор роликового колеса × 4
		Поддон в сборе (с 4-футовым основанием)	крепление × 1 , винт × 4
	R600-NL-0.5	дыхательный мешок	0.5L
	R600-NL-2	дыхательный мешок	2L


	Артикул	Продукт	Спецификация
Consumables and others	R600-ET	эндотрахеальные трубки	ID2.0~10.0mm,17pcs/set
	C45001-00	Ларингоскоп с лампочкой Миллера	5 × лезвий , 1 × ручка
	C45002-00	Волоконный ларингоскоп Миллера	5 × лезвий , 1 × ручка
	R510-31-6	Канистра газового фильтра	6 pcs

Наркозный аппарат

1. Применяемый диапазон веса	От 7 кг до 100 кг животных
2. Дыхательный контур	Поддержка дыхательного контура и возможность расширения не циркуляционного контура.
4. Манометр	Диапазон : -20-100 смH ₂ O
5. Ящик для кальций-лайма	1750ml
6. Клапан APL	С функцией блокировки и сброса давления
7. Расходомер кислорода :	0-4LPM

Испаритель

Концентрация	0~5%(isoflurane) ; 0~8% (sevoflurane)
Точность	±0.1 (0~1%) ; ±0.15 (>1%)
Рабочая температура	10~35°C
Диапазон рабочего расхода	0.2-10LPM
Диапазон колебаний выходного давления	$P \leq 2.5 \text{kPa}$
Объём	>120ml
Способы с добавлением наркоза	Влага-Газ

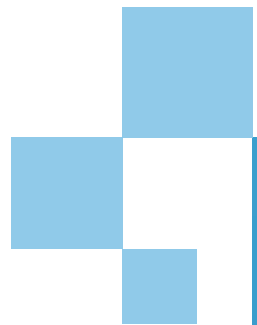

Анализ конкурентных преимуществ


RWD R640-S1

✓

shelf to place monitor

✗

NorVap - "Table Top" model

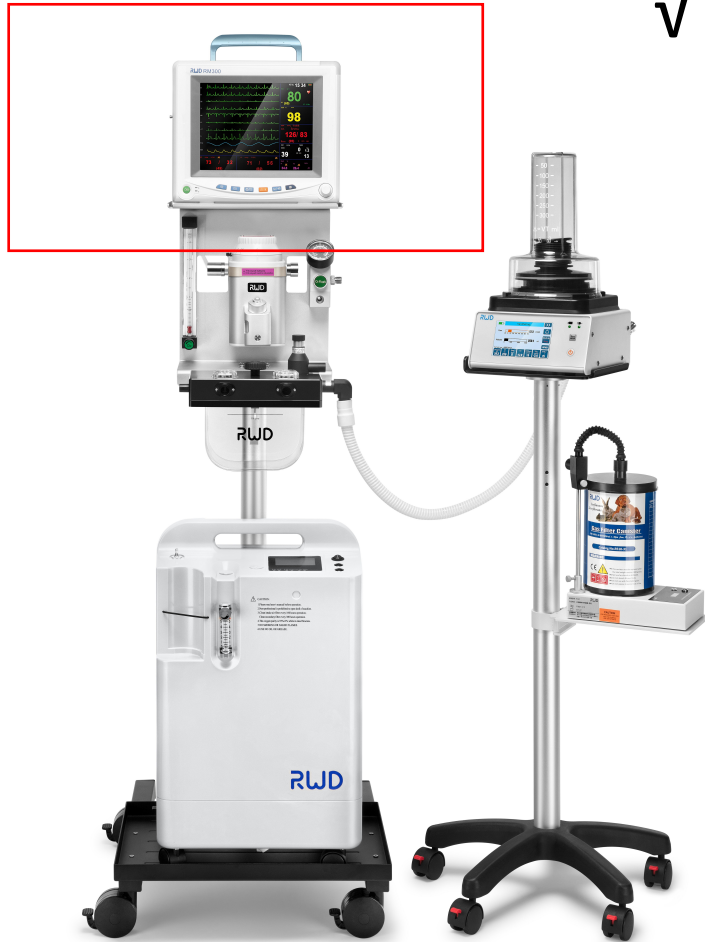

R640-S1 очень компактен. У нас есть полка наверху для размещения монитора, и все опции предназначены для экономии места, большинство операционных имеют небольшие размеры, поэтому наш наркозный аппарат значительно сэкономит место и обеспечит бесперебойную работу.



RWD R640-S1

VS

NorVap - "Table Top" model

✓

Pressure Gauge = Safety

✗




У нас есть манометр для контроля давления в контуре в любое время, особенно когда не опытный ветеринар не настолько хорош, чтобы предотвратить несчастный случай.....



RWD R640-S1

✓

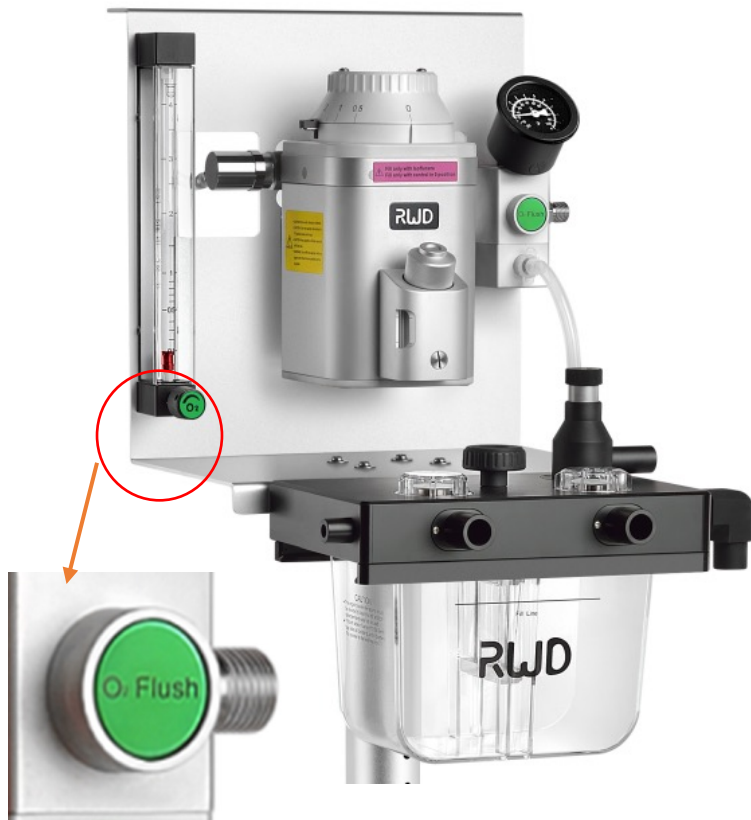


VS

Oxygen flush button

Утопленная кнопка подачи кислорода — — В случае непреднамеренного нажатия и предотвращения аварийных ситуаций

NorVap - "Table Top" model

✗

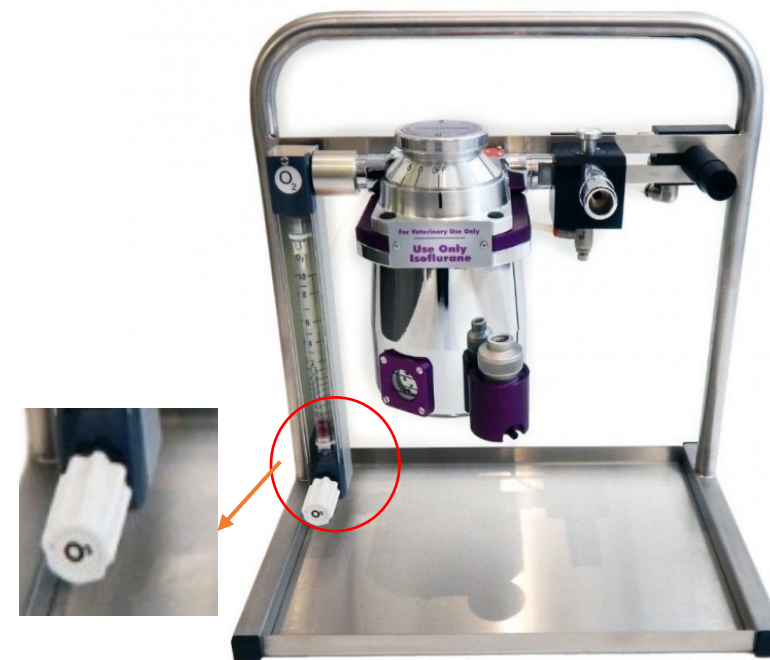

RWD R640-S1

VS

NorVap - "Table Top" model

Support Re-breathing and Non-Rebreathing

✓


✗

Благодаря системе с контуром повторного дыхания ветеринары могут **сэкономить анестетики**, особенно для крупных животных.



RWD R640-S1

✓

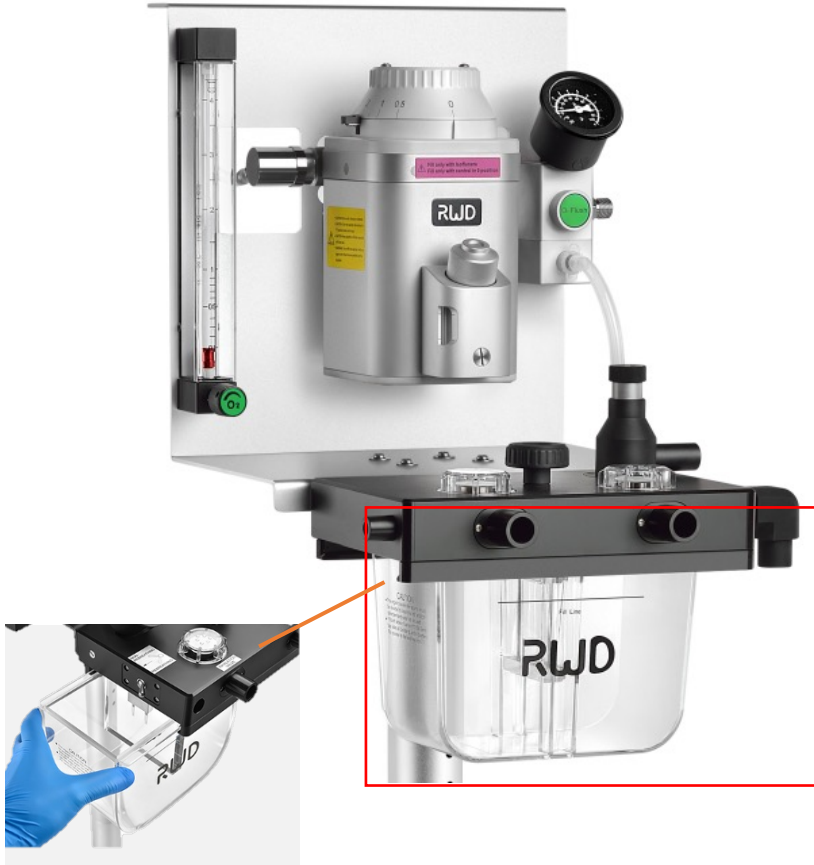


VS

Slide rail type CO2 absorber canister

✗

NorVap - "Table Top" model

Канистра абсорбера CO2 со скользящими направляющими, абсорбирует углекислый газ, восстанавливает анестетики и легко меняется.

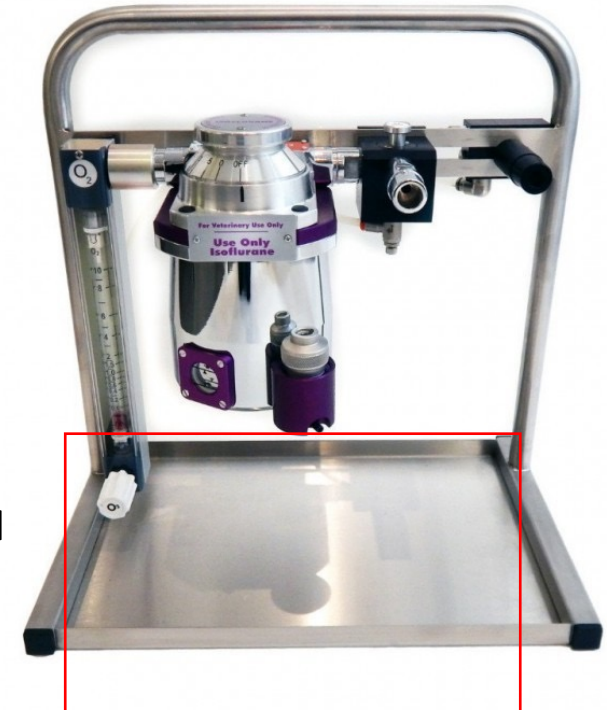

RWD R640-S1

✓



VS

Five Casters with caster lock

R640-S1 эргономичен, с роликами и замком, его удобно перемещать и застревать.

NorVap - "Table Top" model

✗



RWD R640-S1

✓



VS

One-stop solution

R640-S1 наша модель имеет универсальное решение, которое может сэкономить место и выглядит высококлассным, чтобы улучшить эстетический вид вашей операционной..

NorVap - "Table Top" model

✗



THANKS

谢谢聆听

深圳市瑞沃德生命科技有限公司